

10 Si le choc est déconseillé ou s'il a été délivré, "Commencer le massage cardiaque".

Pendant les compressions thoraciques, le ZOLL AED 3 émettra des messages Real CPR Help® concernant la qualité des compressions de RCP.

9 Si un choc est conseillé, "Appuyer sur le bouton de choc clignotant"

1 Mettez le DA sous tension

2 "Vérifier l'état de conscience"

3 "Demander de l'aide"

4 "Ouvrir les voies respiratoires"

5 "Vérifier la respiration"

6 "Si la victime est un enfant, appuyer sur le bouton Enfant"

7 "Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient"

8 "Ne pas toucher la victime. Analyse en cours."

